



**LIFE
WATCHER**



Altyd dichtbij

Handleiding CareTogether

Hoe werkt het (1/2)?

1. Alarm geactiveerd

Je dierbare heeft hulp nodig en drukt op de sos knop van het horloge. De SOS melding wordt verzonden.

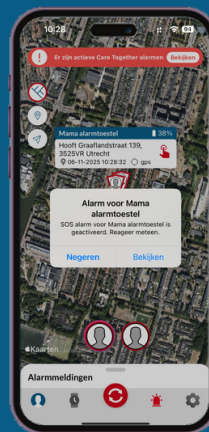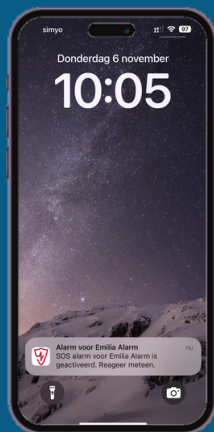

2. Toezichthouders ontvangen SOS alarm

Alle toezichthouders van het Lifewatcher alarmtoestel ontvangen de SOS melding op hun telefoon. De melding blijft zich gedurende 10 minuten iedere 30 seconden herhalen net zolang totdat een toezichthouder de melding oppakt.

Hoe werkt het (2/2)?

3. Chat start automatisch

Kies direct of je het alarm oppakt, of laat weten dat je niet beschikbaar bent.

Volg de ontwikkelingen via de chat.



4. Melding opgepakt en afgehandeld


Via de chat zie je precies wie het alarm heeft opgepakt en afgehandeld. Alle toezichthouders ontvangen doorlopend updates over de voortgang.




Zo activeer je CareTogether (1/3)

Stap 1. CareTogether starten

Open de LifeWatcher-app en selecteer het LifeWatcher toestel waarvoor de de CareTogether wilt instellen. Wanneer je de hoofdgebruiker van het toestel bent, wordt het het icoontje van de CareTogether icoontje in het functiemenu weergegeven. Zie je deze functie niet, zorg dan dat je de laatste versie van de LifeWatcher app hebt geïnstalleerd of controleer of je de hoofdgebruiker (eigenaar) van het toestel bent.

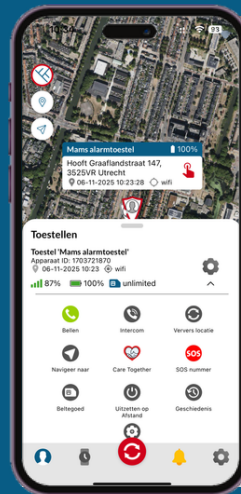

Zo activeer je CareTogether (2/3)

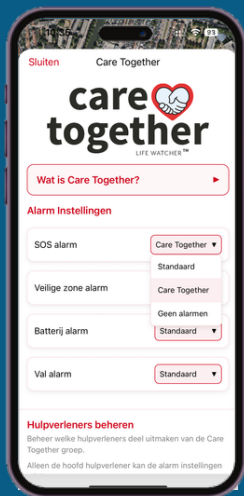


Stap 2. Wijzig de alarminstellingen

In 'CareTogether' kun je bij het SOS alarm de manier van alarmeringen kiezen> Bij "standaard" ontvangen de toezichthouders 1 notificatie. Kies je "CareTogether" dan ontvangen alle toezichthouders een doorlopend alarm en opent de CareTogether groepschat.

Zo activeer je CareTogether (3/3)

Stap 3. Hoe word je CareTogether lid?

Degene die het LifeWatcher toestel als eerste registreert is de hoofdgebruiker. Deze hoofdgebruiker kan via de LifeWatcher app toezichthouders uitnodigen en toevoegen aan de 'CareTogether' groep. Ben je lid van de groep, dan ontvang je de CareTogether meldingen.

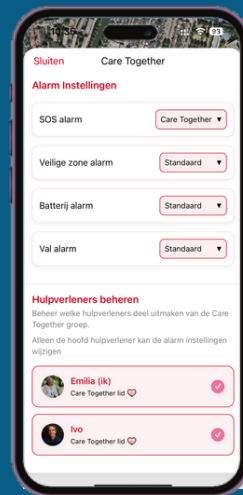

Bekijk hier de CareTogether video

